


PocketCleaner

RINFRESCA GLI AMBIENTI

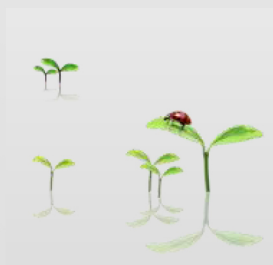



Ciao, Io sono **PocketCleaner**
il tuo **disinfettante CPAP**,
e il tuo **igienizzante per ambienti**.

DATA SHEET DEL PRODOTTO:

Modello:	Ozone Cleaner
Tensione di ingresso	5V DC
Voltaggio del caricabatterie	100-240V AC, 50/60Hz
Potenza nominale	4 W
Output dell'ozono	20 mg/H
Batteria agli ioni di litio integrata	2000 mAh, Ricaricabile
Modalità di funzionamento 1:	Disinfezione ambiente; 5 minuti di lavoro
Modalità di funzionamento 2:	Disinfezione dispositivo CPAP, 35 minuti di lavoro
Temperatura di lavoro	0 - 45 °C
Dimensioni del prodotto	124*66*50mm
Peso lordo	0.4 kg
Accessori	Cavo Usb di ricarica, Caricabatteria


APPLICAZIONE 1

L'apparecchio **CPAP** acronimo di *Continuous Positive Airway Pressure* che in italiano significa Pressione Positiva delle vie aeree , eroga aria che mantiene aperte le vie aeree ed evita che le strutture anatomiche responsabili delle apnee abbiano lo stato di rilassamento che induce il disturbo, essendo un apparecchio medico necessita di essere sempre sterile durante l'utilizzo, collegandolo al nostro **PocketCleaner**, si può raggiungere lo scopo.




APPLICAZIONE 2

Il dispositivo **PocketCleaner** può essere utilizzato per sterilizzare piccoli oggetti come le mascherine protettive inserendole in un apposito contenitore collegato all'apparecchio

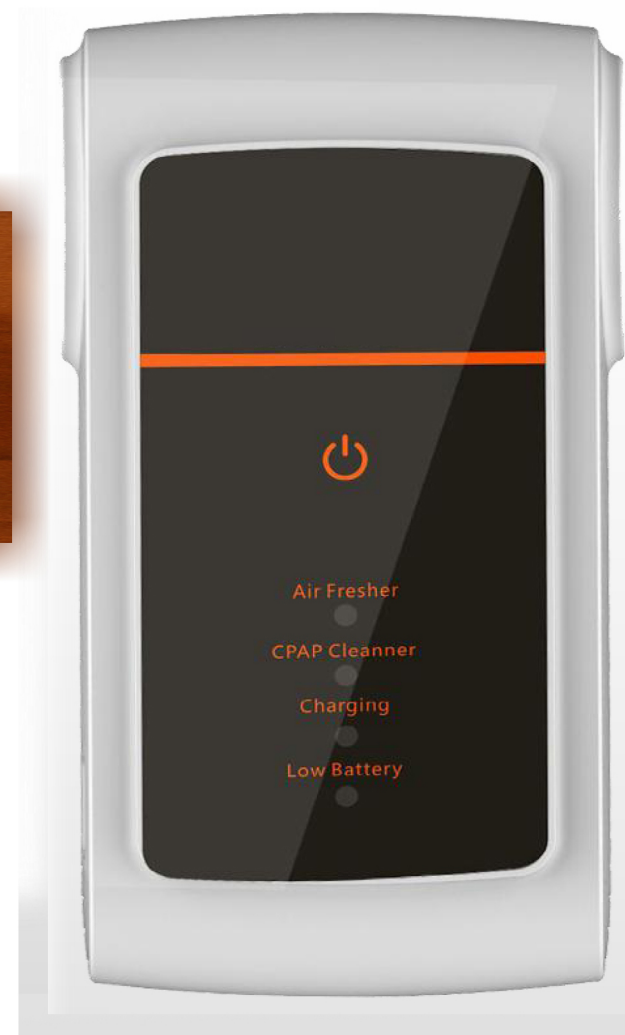

APPLICAZIONE 3

Il dispositivo **PocketCleaner** funzionante in uno spazio delle dimensioni di una stanza, può servire ad eliminare i cattivi odori e rinfrescare l'ambiente.

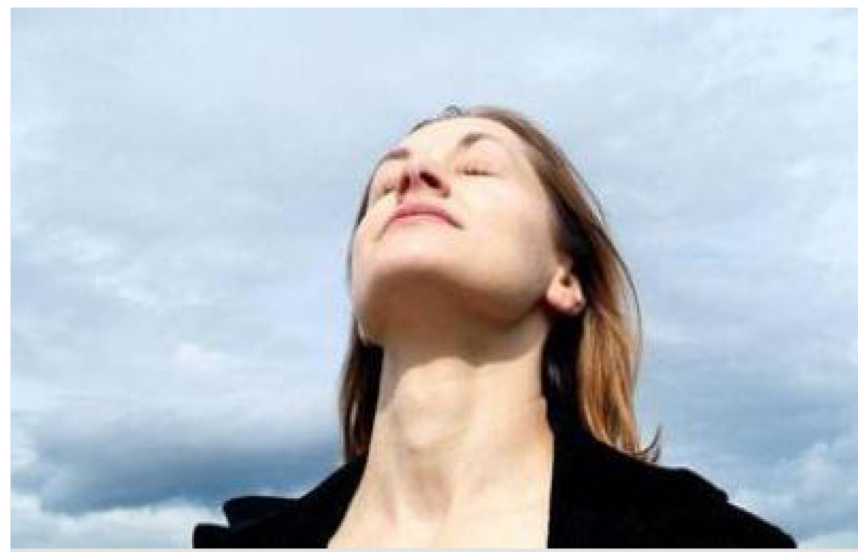

- Pulsante ON/OFF (Modalità touchscreen)




- Indicatori



- Uscita gas Ozono
- Connettore del tubo

- Ingresso ricarica batteria
- Potenza in ingresso 5V DC

- Ventilatore

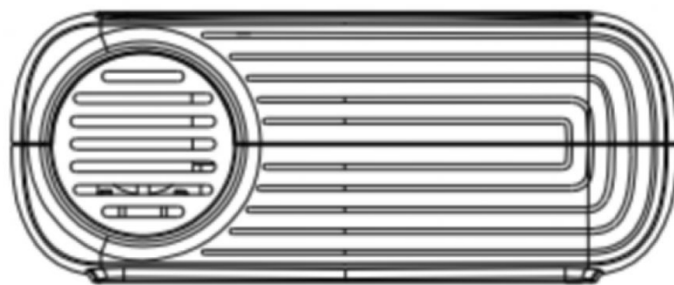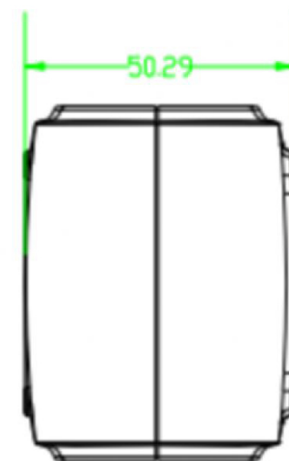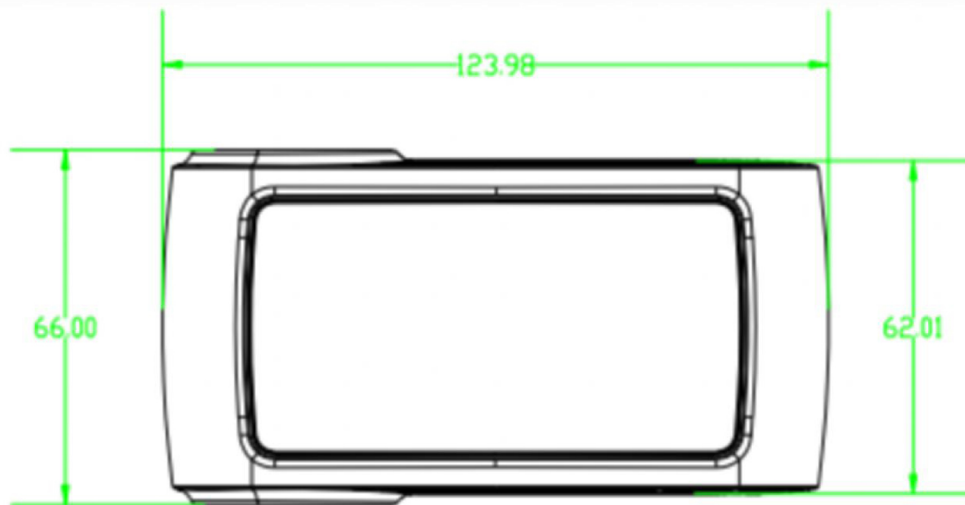


Adatto per la maggior parte dei tubi flessibili
dei dispositivi CPAP, diametro internazionale:
22 mm



**Funziona con
un solo tocco
facile!**



Pannello TOUCHSCREEN

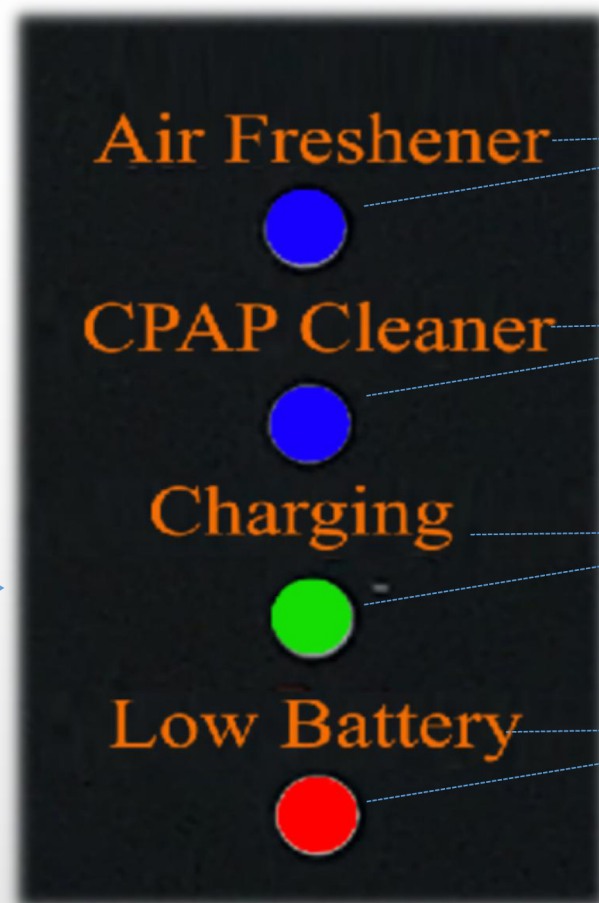


Indicatore Blu acceso:
Modalità di funzionamento
sanificazione aria

Indicatore Blu acceso:
Modalità di funzionamento
pulizia CPAP

**Indicatore verde l
ampeggiante:**
Batteria sotto carica

**Indicatore Rosso
lampeggiante:**
Batteria scarica

Confezione e Accessori

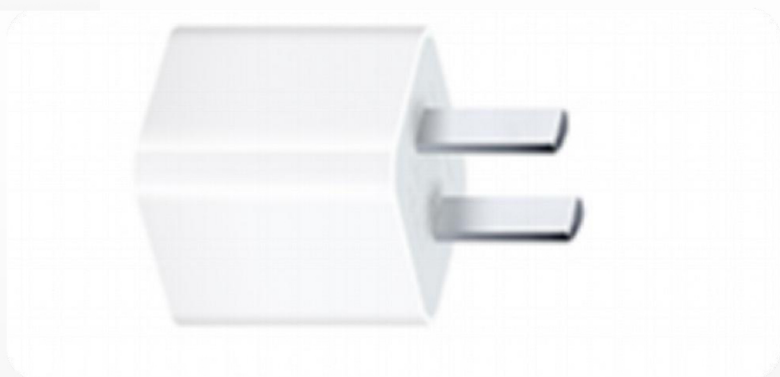



Grazie!!!

**Ingegneri dell'acqua
di Merlino Ing. Francesco
Contrada Santa Lucia Atella (PZ)**

Sito Web: Ingegneridellacqua.it

Email: info@ingegneridellacqua.it

Tel.mobile: 3208666593/3287813040